

# エセンタ™ 粘着剥離剤 スプレー(シリコンベース)

## 1. 使用方法

- 本品を粘着剤の周辺部に噴霧し、数秒間待ってください。
- 粘着剤を皮膚からゆっくりとはがしてください。はがれにくい場合は、必要に応じて本品をさらに噴霧してください。
- 本品は数秒で乾燥するので、乾燥後被覆材や装具を貼付しても粘着に影響を及ぼしません。
- 本品はあらゆる角度から噴射可能です。

内容物：シロキサソ

## 2. 注意

- 本品は必ず上記の説明に従って使用してください。
- 傷、湿疹等異常がある皮膚、粘膜など、繊細で敏感な部位(眼、口、耳、鼻、膣など)には使用しないでください。
- アレルギー反応の懸念がある場合は、使用前にパッチテストを行ってください。
- 本品の使用により皮膚に炎症等が生じた場合は、直ちに使用を中止し、早めに医師の診察を受けてください。

## 3. 警告

- 本品は高圧容器です。高温(40℃以上)および直射日光のあたる場所に置かないでください。
- 本品は引火性の蒸気を発生して燃焼を強める恐れのある引火性の液体です。
- 完全に使い切ったことを確認し、自治体等の規制に従って廃棄してください。使い切ったあとでも、缶に穴をあけたり、燃やしたりしないでください。
- 本品を裸火または白熱電球に噴霧しないでください。
- 使用時は喫煙しないでください。
- 火、熱、火花、静電気の発生源、電気メス等の熱源、発火源の近くで噴霧しないでください。
- 換気の良い場所で噴霧してください。
- ペットまたは子供の手の届かないところに保管してください。
- 本品の蒸気または噴霧を直接吸入しないでください。



高引火性

## 4. 輸入販売元

コンバテック ジャパン株式会社

お客様相談窓口 ☎ 0120-532384

<https://www.convatec.com/ja-jp/>

RM-71771

423289