

エセンタ™ 皮膚被膜剤スプレー(シリコンベース)

1. 使用方法

- 本品は、排泄物や排泄物に含まれる酵素、並びに粘着剤によるダメージから皮膚を保護します。
- 皮膚を清拭し、しっかりと乾燥させてください。
- 噴霧する部位から約10cm離し、ムラが生じないように円を描くような動きで噴霧してください。
- 装具や被覆材などの粘着剤を貼付する前に、被膜剤が完全に乾いていることを確認してください。
- 装具や被覆材を交換する際は、再度本品を噴霧してください。
- 装具や被覆材などの粘着剤と併用しない場合は、皮膚表面の状態に応じて12~72時間ごとに本品を噴霧することを推奨します。
- 通常本品を除去する必要はありませんが、「エセンタ™ 粘着剥離剤」を用いると簡単に除去することができます。
- 本品はあらゆる角度から噴射可能です。

本品により被覆材または装具の粘着に悪影響が生じたり、皮膚表面に保護膜が蓄積したりすることはありません。
内容物：シロキサン共重合体

2. 注意

- 本品は必ず上記の説明に従って使用してください。
- 傷、湿疹等異常がある皮膚、粘膜など、繊細で敏感な部位(眼、口、耳、鼻、膺など)には使用しないでください。
- アレルギー反応の懸念がある場合は、使用前にパッチテストを行ってください。
- 本品の使用により皮膚に炎症等が生じた場合は、直ちに使用を中止し、早めに医師の診察を受けてください。

3. 警告

- 本品は高圧容器です。高温(40℃以上)および直射日光のあたる場所に置かないでください。
- 本品は引火性の蒸気を発生して燃焼を強める恐れのある引火性の液体です。
- 完全に使い切ったことを確認し、自治体等の規制に従って廃棄してください。使い切ったあとでも、缶に穴をあけたり、燃やしたりしないでください。
- 本品を裸火または白熱電球に噴霧しないでください。
- 使用時は喫煙しないでください。
- 火、熱、火花、静電気の発生源、電気メス等の熱源、発火源の近くで噴霧しないでください。
- 換気のよい場所で噴霧してください。
- ペットまたは子供の手の届かないところで保管してください。
- 本品の蒸気または噴霧を直接吸入しないでください。



高引火性

4. 輸入販売元

コンバテック ジャパン株式会社

お客様相談窓口 ☎ 0120-532384

<https://www.convatec.com/ja-jp/>

RM-71773

423288